

# Hörhilfe

Art.-Nr. 141 864 785

## BEDIENUNGSANLEITUNG

*Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.*

### Eigenschaften

- Die Hörhilfe verstärkt den Ton bei geringem Hintergrundrauschen um ein 30-faches.
- Eingebauter Akku, bequem aufzuladen, kein Batteriewechsel.
- Der voll aufgeladene Akku reicht für 8 – 10 Stunden durchgehenden Gebrauch aus.
- Für bestes Hören bitte die Ohrstöpsel sauber halten.
- Austauschbare Ohrstöpsel, um den Umgebungslärm abzudichten.

### Technische Daten

- Akku: 1,2 V
- Arbeitsstrom:  $\leq 3$  mA
- Signal-Rausch-Verhältnis:  $\leq 28$  dB
- Frequenz: 100 - 4000 Hz
- Verstärkung: 30 dB
- Verzerrung:  $\leq 6$  %

Die Hörhilfe wird für eine lange Zeit auf Stand-by gehalten. Die Ladeanzeige der Basis kann während des Ladevorgangs flackern, was normal ist (zeigt die Ladebereitschaft). In diesem Fall müssen Sie nur die Basis der Hörhilfe mehrere Male einstecken.

### Pflege und Wartung

- Reinigen Sie die wiederaufladbare Hörhilfe täglich mit der mitgelieferten Bürste, um unerwünschte Ohrenschmalzablagerungen zu vermeiden. Bürsten Sie das Gerät mit der mitgelieferten Bürste über den Ohrhörer hin und her, um Ohrenschmalz und Schmutz zu entfernen, die sich im Ohrhörer abgesetzt haben.
- Vergewissern Sie sich, dass die Ohrstöpsel frei von Ablagerungen und Schmutz sind.
- Wischen Sie die Hörhilfe nur mit einem sauberen, trockenen Tuch ab.

## Wichtige Informationen zum Tragen einer Hörhilfe

Diese wiederaufladbare Hörhilfe ist ein Schallverstärker und kann alternativ zu einem Hörgerät verwendet werden.

Es wird empfohlen, vor der Entscheidung, einen Hörverstärker zu tragen, einen zugelassenen Arzt aufzusuchen und regelmäßige Kontrolluntersuchungen durchzuführen, um sicherzustellen, dass keiner der folgenden Punkte zutrifft. Tragen Sie die wiederaufladbare Hörhilfe NICHT, wenn:

- Sie Schmerzen und Unbehagen im Ohr haben.
- Sie an traumatischen oder sichtbaren angeborenen Deformationen an Ihrem Ohr leiden.
- Sie akuten oder chronischen Schwindel haben.
- Sie innerhalb der letzten 90 Tage einen plötzlichen oder schnell fortschreitenden Hörsturz erlitten haben.
- Sie einen einseitigen Hörverlust oder einen plötzlichen aufgetretenen Hörverlust innerhalb der letzten 90 Tage erlitten haben.
- Signifikante Ansammlung von Ohrenschmalz oder anderen Materialien in Ihrem Gehörgang.

## Zubehörteile




*Reinigungsbürste*



*Adapter*



*USB-Ladekabel*

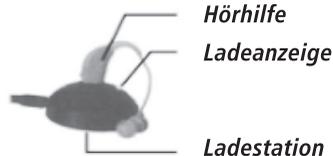

*Hörhilfe*

*Ladeanzeige*

*Ladestation*



*6 x Silikonaufsätze*



*Lautstärkereglер*

*An/Ausschalter*

*Silikonaufsatz*

## Vorsicht

- Diese wiederaufladbare Hörhilfe ist NICHT für den Gebrauch von Kindern unter 15 Jahren geeignet.
- Gerät außer Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren.
- Die Ladekontakte dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Feuchtigkeit und Nässe meiden.

## Erstinbetriebnahme

Es ist wichtig, dass Sie die folgenden Anweisungen befolgen, wenn Sie die wiederaufladbare Hörhilfe zum ersten Mal aufladen:

1. Schieben Sie den Schalter auf der Rückseite der Hörmuschel nach unten, um die wiederaufladbare Hörhilfe auszuschalten.
2. Schließen Sie das Kabel des Adapters an die Ladestation an und stecken Sie das andere Ende des Adapterkabels in eine Steckdose. Beim Einstecken leuchten die rote Lampe am Adapter (siehe Abbildung C) und die grüne Lampe an der Ladestation (siehe Abbildung D) gleichzeitig auf.
3. Setzen Sie die wiederaufladbare Hörhilfe in die Ladestation ein. Die grüne Leuchte an der Ladestation leuchtet rot, wenn das Gerät richtig angeschlossen ist. Außerdem blinkt die Anzeileuchte und zeigt damit an, dass die Ladestation die Hörhilfe auflädt. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Anzeileuchte wieder grün.

**HINWEIS:** Nehmen Sie die wiederaufladbare Hörhilfe NICHT aus der Ladestation, bevor die Leuchte (wieder) grün leuchtet und damit anzeigt, dass der Akku vollständig aufgeladen ist.

**WICHTIG! Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um eine längere Laufzeit zu gewährleisten.**

## Bedienung

So tragen Sie die wiederaufladbare Hörhilfe:

- Die wiederaufladbare Hörhilfe wird mit 6 verschiedenen Silikon-Ohrstücken geliefert.
- Wählen Sie den Silikon Aufsatz, der am besten zu Ihrem Ohr passt, und setzen Sie ihn auf die wiederaufladbare Hörhilfe.
- Die wiederaufladbare Hörhilfe kann sowohl im rechten als auch im linken Ohr getragen werden.
- Unterhalb des Lautstärkereglers befindet sich der Ein/Aus-Schalter. Dieser muss sich

in der Position „An“ (oder „Up“) befinden, um das Gerät benutzen zu können. Wenn Sie den Schalter auf „Aus“ schieben, wird das Gerät ausgeschaltet.

- Das Hörstück passt sich durch leichtes Biegen der Ohrform an und kann hinter das Ohr geklemmt werden.
- Nehmen Sie dann den Ohrstöpsel der wiederaufladbaren Hörhilfe, der sich am Ende des kleinen Drahtes befindet, und führen Sie ihn vorsichtig in den Gehörgang ein.
- Stellen Sie abschließend die Lautstärke auf den gewünschten Wert ein.

## Lieferumfang

- Wiederaufladbare Hörhilfe
- Adapter
- Docking-Station zum Aufladen
- Reinigungsbürste
- Sechs anpassbare Silikonaufsätze

## Lagerung

Wenn Sie die wiederaufladbare Hörhilfe nicht benutzen, reinigen Sie das Gerät und lagern Sie es an einem trockenen, kühlen Ort.

## Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



## Kundenservice:

# Weltbild

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: **Weltbild GmbH & Co. KG, Ohmstraße 8a, 86199 Augsburg**

**Deutschland** **Telefon:** 0821/90069959 **E-Mail:** info@weltbild.de  
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr, Ortstarif)

**Schweiz** **Telefon:** 0848 810 810 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch  
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr, Fr. 0,08 pro Minute, Mobil- und Festnetz)

**Österreich** **Telefon:** 0662/939 0 939 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at  
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr, Ortstarif)